

Stérimar Allergia, 50ml

Csecsemők, gyermekek és felnőttek számára egyaránt ajánlott 100%-ban természetes tengervizes orrspray

- Tisztítja az orrot, miközben **eltávolítja az** ornyálkahártyával érintkező **allergéneket**
- **Megelőzi az allergiás tüneteket:** tüsszögést, orrfolyást és viszketést
- **Hidratálja az ornyálkahártyát,** és helyreállítja természetes nedvességtartalmát
- **Mangánnal dúsított**
- Nem álmosít
- Tartósítószermentes, 100%-ban természetes tengervizes orrspray

Napi használatra már a pollenszezon kezdetétől javasolt tartósítószermentes, tengervizes orrspray, mely megelőzi az allergiás tüneteket.

42%-kal csökkenti az akut szénanáthás tünetek előfordulási gyakoriságát*

*Egy 60 felnőtt bevonásával végzett vizsgálat szerint, melyben 30-an 5 hónapon át naponta használtak Sterimart a normál kezelésük mellett (M.Grasso et al., 2018)

Javasolt alkalmazás:

Első használatkor permetezzen egyet, hogy az eszköz működni kezdjen.

Orrtisztítás és az ornyálkahártya hidratálása:

Tartsa a fejét egyenesen és helyezze a szórófejet az ornyílásba. Permetezzen egyszer vagy kétszer mindkét orrlyukba. Hagyja kifolyni a felesleget, majd fújja ki az orrát.

Az orrüreg mélyebb tisztítása:

Döntse fejét oldalra és helyezze a szórófejet az orr felső részébe.

A szórófejet tartsa nyomva hosszabban. Hagyja kifolyni a felesleget a másik orrlyukon, majd fújja ki az orrát.

Használja naponta 2-6 alkalommal.

A szórófejet minden használat után forró vízzel alaposan tisztítsa meg, majd száraz ruhával törölje meg.