

Stérimar Baby orrspray, 50ml

Stérimar Baby orrspray, 100ml

Csecsemőknek és 3 év alatti gyermekeknek 100%-ban természetes tengervízből

A speciálisan csecsemők számára kifejlesztett orrspray megszabadítja az orrot a szennyeződésektől, segíti a légzést, a szoptatást és a cumisüveges táplálást. **Tökéletes napi higiénia kisbabája számára! Izotóniás sóoldatot tartalmaz.**

A tengervíz alkalmas a mindennapos orrtisztításra és fül-orr-gégészeti betegségek megelőzésére az orrnyálkahártya védőfunkciójának megerősítésével; allergiás és megfázásos időszakban.

A **Stérimar Baby** orrhigiénia egy mindennapos használatra javasolt orvostechikai eszköz, **0-3 éves korú gyermekek részére.**

Szűrt, **100%-ban természetes és tartósítószermentes STÉRIMAR™ tengervíz** előnyeit az ásványi sók ismert tulajdonságai és a tengeri nyomelemek, mint pl. cink, réz, mangán, vas, magnézium, szelén biztosítják.

Technológia:

- Újszülötteknek kifejlesztett biztonsági fúvóka, amely tökéletesen illeszkedik a kicsik orrához ergonomikus formájának és önzáró végének köszönhetően
- Lágú fúvóka a sérülékeny nyálkahártya veszélyeztetése nélkül
- Anti-reflux szeleprendszer, mely 100% -ban megőrzi a benne található formula minőségét a felbontást követően is, a szennyeződés veszélye nélkül, a védőfedél pedig garantálja a jobb higiénit
- Védőfedél a jobb higiénia érdekében

Javasolt alkalmazás:

Első használatkor permetezzen egyet, hogy az eszköz működni kezdjen.

Óvatosan helyezze be a szórófejet az orrlyukba. Permetezzen röviden 1-2 alkalommal mindkét orrlyukba. Mielőtt letörölné a gyermek orrát, hagyja, hogy a felesleges folyadék kifolyjon.

Az orrüreg mélyebb tisztítása:

Fektesse a 0-2 éves csecsemőt a hátára, vagy 2 évesnél idősebb kisgyermekek esetében, ültesse fel a gyermeket. Döntse a csecsemő fejét oldalra (soha ne hátra) és óvatosan helyezze a szórófejet az orr felső részébe. Nyomja le a szórófejet hosszabb ideig. Hagyja, hogy a felesleges folyadék kifolyjon a másik orrlyukon, majd törölje meg a gyermek orrát. Szükség esetén ismételje meg a műveletet a másik orrjárattal is.

A szórófejet minden használat után forró vízzel alaposan tisztítsa meg, majd tiszta, száraz ruhával törölje le.

Naponta 2-6 alkalommal használja.