

210mm



# STERIMAR™

## SINUSITIS

### ERŐS ORRDUGULÁSRA

A STÉRIMAR™ tengervízét a Cancale-öbölből merítik (Bretagne, Franciaország), egy olyan kivételes és védett területről, mely környezeti minőségéről híres.

#### Mit jelent a sinusitis?

A rhino-sinusitis (magyarul orrmelléküreg-gyulladás)-amit gyakran csak "sinusitis"-nek neveznek - a (szem körüli) arccsontoktól a koponyaalapig terjedő, levegővel töltött öblök/üregek és az orrnyalhártya gyulladása. 2 típusú orrmelléküreg-gyulladás létezik: a bakteriális akut orrmelléküreg-gyulladás (10-14 napig tart) és a krónikus orrmelléküreg-gyulladás (legalább 12 hétig tart). Az orrmelléküreg-gyulladás télen a leggyakrabban diagnosztizált légúti fertőzés.

A fertőzés kiterjed az orrnyalhártyára, amely irritálttá és duzzadtá válik, elzárva a melléküregeket, amelyek normál esetben az orrváladékkal ürülnek, amely most nem tud távozni. A pangó váladék elősegíti a mikroorganizmusok szaporodását, továbbá nyomásfokozódáshoz vezet a melléküregekben. Ez a kórfolyamat gyakran követi az orrgaratgyulladást, vagyis a náthát.

#### JAVALLAT

A STÉRIMAR™ Sinusitis egy orvostechnikai eszköz.

A 100%-ban természetes tengervíz alapú, eukaliptusz (*Eucalyptus globulus*) illóolajjal dúsított STÉRIMAR™ Sinusitis egy hipertóniás tengervizes oldat (az emberi test sejtjeinél magasabb a sókoncentrációja), amely ozmózis hatás révén aktívan feloldja az orrdugulást.

Javasolt gyermekeknek 6 éves kortól és felnőtteknek megfázás, nátha, akut vagy krónikus orrmelléküreg-gyulladás esetén:

Megszünteti az orrdugulást kevesebb mint 1 perc alatt\*

Elfolyósítja és kitisztítja még a sűrű orrváladékot is

Felveszi a harcot a megfázásos tünetekkel, és enyhíti az orrmelléküreg-gyulladást

Gyorsan hat

Ha feloldódik az orrdugulása és kitisztul az orra, megkönnyebbülnek és felfrissültnék érzi magát. Újra élvezheti a szabad légzés kényelmét.

\*A betegek 63%-a arról számolt be, hogy kevesebb mint 1 perc alatt érezte az orrdugulás megszűnését a kezelés első 7 napjának értékelése alapján.

#### BIZTONSÁG

**Szennyeződésmentes szelep:** Az antireflux szeleprendszer megakadályozza az oldat szennyeződését és a felbontást követően is, ami azt jelenti, hogy a készítmény 100%-osan hatékony marad a jövőbeni alkalmazásra is.

A 20 ml-es könnyen magunkkal vihető kiserelés gyors enyhülést nyújt, amikor csak szüksége van rá.

#### JAVASOLT ALKALMAZÁS

- ▶ Fújja ki az orrát, orrlyukanként külön-külön.
- ▶ Rázza fel az orrspray-t használat előtt.
- ▶ Távolítsa el a védőkupakot.
- ▶ Az első használatkor, és amikor szükséges, permetezzen 1-3 alkalommal, hogy a rendszer működni kezdjen. Eközben tartsa az orrspray-t függőlegesen, és permetezzen a fúvókával felfelé.
- ▶ Tartsa a palackot függőlegesen, és helyezze a fúvókát az orrlyukba, a fejet kissé annak az orrlyuknak az irányába döntve, amelyikbe a befújás történik.
- ▶ Fújjon be kétszer, finoman belélegezve.
- ▶ Ismétlje meg ezt az eljárást a másik orrlyukban is.
- ▶ Hagyja az oldatot néhány percig hatni anélkül, hogy kifújná az orrát.
- ▶ Hagyja kifolyni a felesleget, szárítsa meg, majd fújja ki az orrát, ha szükséges.
- ▶ Minden használat után tisztítsa meg a fúvókát meleg vízben, öblítse le és szárítsa meg a védőkupak visszahelyezése előtt.

#### ELLENJAVALLAT

Nem ajánlott valamelyik összetevővel szembeni túlérzékenység esetén.

Nem ajánlott alkalmazni, ha nem áll fenn orrdugulás.

Használata nem javasolt terhes nőknek vagy szoptató anyáknak.

Ha az orrnyalhártya irritált,

alkalmazás közben bizsergés jelentkezhet.

Kétség esetén forduljon tanácsért gyógyszerészéhez, vagy konzultáljon háziorvosával vagy fül-orr-gégész szakorvossal.

Szobahőmérsékleten tárolandó.

#### ADAGOLÁS

Használja a STÉRIMAR™ Sinusist a megfázás, nátha, krónikus vagy akut orrmelléküreg-gyulladás első tüneteinek jelentkezésekor.

6 éves kortól alkalmazható.

2 befújás orrlyukanként, naponta legfeljebb 6 alkalommal.

#### ÖSSZETÉTEL

tengervíz • nátrium-hialuronát • kaprilil/kapril-glükózid • Eucalyptus globulus illóolaj • réz-szulfát • mangán-szulfát • tisztított víz.

Aszeptikus csomagolás.

Az utolsó felülvizsgálat dátuma: 2023. január

Nettó térfogat: 20ml. e

LABORATOIRES FUMOUBE

SOFIBEL Laboratoires Fumouze  
110-114, rue Victor Hugo  
92686 Levallois-Perret Cedex-France

www.sterimar.com

Magyarországon forgalmazza:  
Pharmanext Kft.  
Budapest  
Stahly u. 2/a

www.sterimar.hu NOT26411V01 R02-2023



155mm

210mm

PAPER 100 90 75 50 25 5 1



COACH HOUSE // AMPLIFY // PHOTOTYPE

#### SMART ART PRODUCTION ART INFORMATION

PROJECT #: 2173883 Wave\_1

SKU JOB #: 2173884

FILE NAME: PA2173884\_R4.ai

CONTACT: Angela Pearson

E-MAIL: Angela.Pearson@olberdingbrands.com



Church & Dwight Co., Inc  
500 Charles Ewing Boulevard  
Ewing, NJ 08628  
800.833.9532

## MECHANICAL: ROUND 4

#### JOB INFORMATION

JOB DESCRIPTION: STERIMAR SINUSITIS HUNGARY 20ML LFT 2022

BRAND: Sterimar

FRONT MATERIAL #: 508628

BACK MATERIAL #:

FRONT COPY CODE #: NOT26411V01

BACK COPY CODE #:

UPC #: 169

LAST REVISION DATE: 02/14/2023

#### ADDITIONAL JOB INFORMATION (if available)

PRINT PROCESS: Litho

PRINTER: MMP Packetis, CHAZELLES

SUBSTRATE: Paper

PRINTER DIE#: 210 x 155mm


JOB SIZE: 20ml

#### C&D APPROVALS

IP #:



#### FRONT COLORS

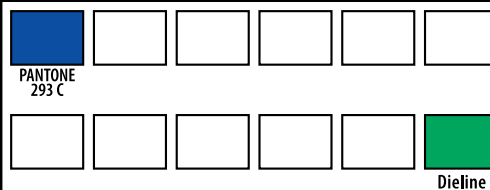

#### BACK COLORS



#### LIMITATION OF LIABILITY

DO NOT PLATE, ENGRAVE, OR PROCEED TO PRESS WITH THIS FILE WITHOUT PROPER INSPECTION

All files and proofs must be thoroughly inspected by the recipient immediately upon receipt. It is the responsibility of the recipient to examine and proofread all files and proofs. In the event file(s) and/or proof(s) are found to be incorrect upon inspection, call 513-281-0999 and ask for the separation contact. The liability of Olberding Brand Family shall be limited to correcting and replacing the materials that we supplied that were found to be defective. Olberding Brand Family will not be liable for any other loss or damage including, but not limited to, cost of Flexo printing plates that we did not make, print cylinders, inks, substrates/printed materials, and/or make ready and press time.