

## Stérimar orrspray, 50ml Stérimar orrspray, 100ml

Az orr higiéniája és komfortérzete érdekében felnőtteknek és gyermekeknek 3 éves kortól

**Gyermekek és felnőttek esetén egyaránt alkalmazható**, hiszen kíméletesen tisztítja és hidratálja az orrnyálkahártyát, javítja a légzést és megelőzi a náthát.

Megelőzi a fül-orr-gégészeti rendellenességeket (nátha, szénanátha, arcüreggyulladás, fülfertőzések, stb.) az orrnyálkahártya védelmének megerősítésével. Orrműtétek után is használható. **Izotóniás sóoldatot tartalmazó orvostechnikai eszköz.**

Ezen kívül a légzés javításával segíti az alvást és az alvás minőségének javulását.

Javasolt adagolás: Naponta 2-6 befújás mindkét orrlyukba.

Szűrt, **100%-ban természetes és tartósítószermentes STÉRIMAR™ tengervíz** előnyeit az ásványi sók ismert tulajdonságai és a tengeri nyomelemek, mint pl. cink, réz, mangán, vas, magnézium, szelén biztosítják.

### Technológia:

- Speciális fúvófej, kifejezetten a gyermekek és felnőttek orrlyukának anatómiájához igazítva
- Az orrnyálkahártyához illesztett fúvókanyomás
- Anti-reflux szeleprendszer, mely 100% -ban megőrzi a benne található formula minőségét a felbontást követően is, a szennyeződés veszélye nélkül, a védőfedél pedig garantálja a jobb higiéniát.

### Javasolt alkalmazás:

Első használatkor permetezzen egyet, hogy az eszköz működni kezdjen.

#### **Orrtisztítás és az orrnyálkahártya hidratálása:**

Tartsa a fejét egyenesen és helyezze a szórófejet az orrnyílásba. Permetezzen egyszer vagy kétszer mindkét orrlyukba. Hagyja kifolyni a felesleget, majd fújja ki az orrát.

#### **Az orrüreg mélyebb tisztítása:**

Döntse fejét oldalra és helyezze a szórófejet az orr felső részébe.

A szórófejet tartsa nyomva hosszan, 2-3 másodpercig. Hagyja kifolyni a felesleget a másik orrlyukon, majd fújja ki az orrát.

A szórófejet minden használat után forró vízzel tisztítsa, majd szárítsa meg.

Naponta 2-6 alkalommal használja.