

WAYA StopReflux®

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ A GASTROESOPHAGEALIS REFLUXBETEGSÉG KEZELÉSÉRE
CITROM ÍZESÍTÉSSEL

Gluténmentes | Laktózmentes

Indikáció:

A WAYA StopReflux® folyadék tasakban a gastrooesophagealis refluxbetegség kezelésében javallott készítmény, a következő tünetek enyhítésére:

- gyomorégés;
- gyomorsav-visszaáramlás;
- reflux miatt kialakult nyelőcsőgyulladás (oesophagitis);
- nyelési nehézség (dysphagia);
- fájdalmas nyelés (odynophagia).

Az összetevők szinergikus hatásának köszönhetően a WAYA StopReflux® gyorsan enyhíti a tüneteket:

- mechanikusan megakadályozza a refluxot – kevesebb mint 3 percen belül;
- csökkenti a gyomorégést;
- védi a nyálkahártyát és segíti a gyógyulását.

Összetétel:

Víz, magnézium-alginát, kalcium-karbonát, kálium-bikarbonát, nátrium-hialuronát, kondroitin-szulfát, ízesítők; Tartósítószer: metil-para-hidroxibenzoát (metilparabén), etil-para-hidroxibenzoát (etilparabén); Édesítőszer: szteviol-glikozidok, szukralóz.

Használata:

Alkalmazható felnőtteknél és 12 évnél idősebb gyerekeknél: 1 tasak tartalmát kell szájon át bevenni főétkezések után és lefekvés előtt, vagy az orvos utasítása szerint. Használat előtt fel kell rázni, és felbontás után a tasak tartalmát azonnal fel kell használni.

A WAYA StopReflux® a nap bármely időszakában használható. Hatását akkor fejti ki legjobban, ha az alkalmazását követő 30 percen belül fogyaszt ételt vagy italt. Az alkalmazás időtartama a tünetek előfordulásától függ. Ne használja 30 napnál hosszabb ideig. Ha a tünetek továbbra is megmaradnak, forduljon orvoshoz. Amennyiben a gyógyulás szükségessé teszi, hosszabb távon is használható.

Figyelem:

A WAYA StopReflux® tasak tartalma csak szájon át alkalmazható.

- ne alkalmazza, ha egy vagy több összetevővel szemben túlérzékeny vagy allergiás;
- terhesség vagy 3 év alatti gyermek esetén a termék használata előtt forduljon orvoshoz;
- lejáratí idő után ne használja;
- ne használja fel, ha a csomagolás vagy a tasak sérült;
- ne lépje túl az ajánlott napi adagot;
- a terméket a használati útmutatónak megfelelően használja;
- más gyógyszer alkalmazása esetén forduljon orvosához;
- gyermekektől tartsa távol;
- használat után a tasakot ne dobja el a természetben.

Mellékhatások:

A WAYA StopReflux® alkalmazásának nincs ismert mellékhatása.

Az eddig elvégzett vizsgálatok nem mutattak ki túlérzékenységi reakciókat vagy kedvezőtlen eseményeket. Amennyiben ilyen előfordulna, forduljon orvoshoz.

Felhasználható:

A WAYA StopReflux® tasakokat 25° C alatti hőmérsékleten, hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól távol kell tárolni.

Lejáratí idő után ne használja. A lejáratí idő a megfelelően tárolt termékre vonatkozik

A WAYA StopReflux® folyadék tasakban az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC irányelvnek és módosításainak megfelelő besorolást kapott és annak megfelelően készül.

- 14 db, egyenként 10,8 g tartalmú tasakban kapható orvostechnikai eszköz
- Utolsó módosítás dátuma: 2023/06



Jelmagyarázat:



Használat után ne dobja el a természetben.



Olvassa el a használati útmutatót



Lejáratí idő



Egyszer használható készítmény - ne használja fel többször



Gyártási tételszám



Gyártó



Használati útmutató



25° C alatti hőmérsékleten tárolandó



Gyártó:

Salix S.r.l.
Viale del Lavoro, 14 - 36030 Monte di Malo (VI)
Italy

Forgalmazó:

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Szlovénia -
Tel.: 06 23 801 028

WAYA StopReflux®

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕЗОФАГАЛЕН РЕФЛУКС
С ВКУС НА ЛИМОН

Без глутен | Без лактоза

Показания:

WAYA StopReflux® ликвид саше е медицинско изделие, предназначено за лечение на гастроезофагеален рефлукс за намаляване на симптоми като:

- киселини в стомаха;
- киселинен рефлукс;
- рефлукс-индуциран езофагит;
- затруднено преглъщане (дисфагия);
- болезнено преглъщане (одинофагия).

Благодарение на синергичното действие на своите компоненти, WAYA StopReflux® позволява бързо облекчаване на симптомите, като:

- предотвратява рефлукса по механичен начин — за по-малко от 3 минути;
- облекчава стомашните киселини;
- предпазва и възстановява лигавицата.

Състав:

Вода, магнезиев алгинат, калциев карбонат, калиев бикарбонат, натриев хиалуронат, хондроитин сулфат, овкусители; консерванти: метил р-хидроксibenзоат (метилпарабен), етил р-хидроксibenзоат (етилпарабен); подсладители: стевиол гликозиди, сукралоза.

Как да се използва:

Подходящ е за приложение при възрастни и деца над 12 години: 1 ликвид саше да се приема през устата след основно хранене и преди лягане или според съвета на лекаря. Разклатете преди прием и консумирайте съдържанието на ликвид сашето веднага след отваряне.

WAYA StopReflux® ликвид саше може да се използва по всяко време през деня. Най-добро действие се постига, ако не се консумират храни или напитки през първите 30-те минути след приема на WAYA StopReflux®. Действителната продължителност на приема може да зависи от наличието на симптомите. Да не се използва за периоди, по-дълги от 30 дни. Ако симптомите продължават, консултирайте се с лекар.

Предупреждение:

WAYA StopReflux® ликвид саше е предназначена само за перорално приложение.

- Да не се приема в случай на свръхчувствителност или алергия към една или повече съставки;
- Консултирайте се с лекар или фармацевт преди да приемате продукта по време на бременност или при деца под 3-годишна възраст;
- Да не се използва след изтичане на срока на годност;
- Да не се използва, ако опаковката или ликвид сашето са повредени;
- Да не се превишава препоръчителната дневна доза;
- Прилагайте продукта според инструкциите;
- Консултирайте се с лекар или фармацевт в случай че приемате WAYA StopReflux® ликвид саше с други лекарствени продукти;

- Съхранявайте на място недостъпно за деца;
- Пазете околната среда чиста и изхвърляйте ползваното ликвид саше на предназначени за това места.

Нежелани реакции:

Не са известни нежелани реакции, свързани с приема на WAYA StopReflux® ликвид саше. Проучванията, проведени до този момент, не показват симптоми на свръхчувствителност, нито нежелани реакции. В случай на поява на такива се консултирайте с лекар.

Съхранение:

Съхранявайте WAYA StopReflux® ликвид саше на сухо място при температури под 25 °C. Пазете далеч от източници на топлина. Не използвайте продукта след изтичане на срока на годност. Срокът на годност се отнася за правилно съхранявания продукт.

WAYA StopReflux® ликвид саше е медицинско изделие, класифицирано и произведено в съответствие с Директива 93/42/ЕИО и нейните последващи изменения.

- медицинското изделие се предлага в опаковка с 14 ликвид сашета, всяка по 10,8 g
- дата на последно изменение: 2023/06

CE 1370

Легенда на символите:



Да не се изхвърля в околната среда след употреба



Прочетете внимателно инструкциите за употреба



Срок на годност



Медицинско изделие за еднократна употреба



Партиден номер



Производител



Инструкции за употреба



Съхранявайте при температури под 25 °C



Производителя:

Salix S.r.l.
Viale del Lavoro, 14 - 36030 Monte di Malo (VI),
Италия

Официален представител за България:

„Медис Фарма България“, ЕООД, ул.Проф.
Атанас, Иширков 31, София