
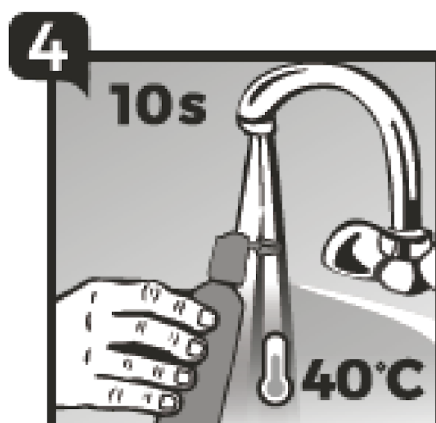
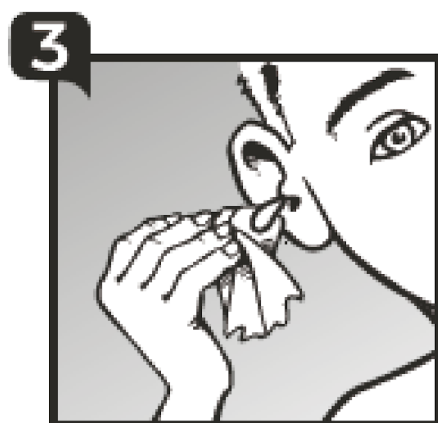
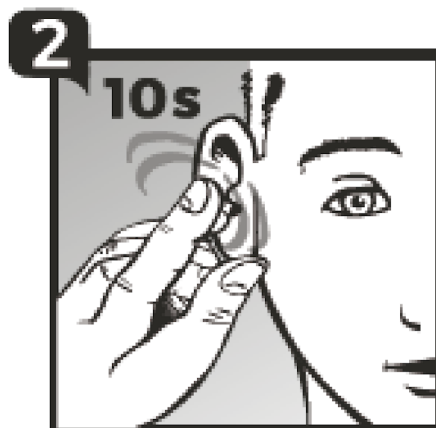


AUDISPRAY

JUNIOR

3>12

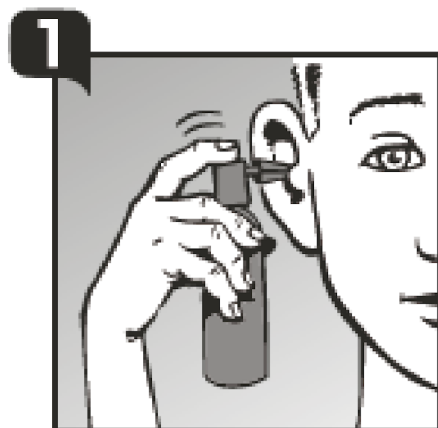

Coopération Pharmaceutique Française
Place Lucien Auvert
77020 Melun Cedex - France/ Franța

ASTUCCIO: PAP21 - RACCOLTA CARTA
ISTRUZIONE: PAP22 - RACCOLTA CARTA
BOTTIGLIA: HDPE2 - RACCOLTA PLASTICA
EROGATORE: HDPE2 - RACCOLTA PLASTICA
Raccolta Differenziata. Verifica le disposizioni
del tuo Comune.



Date of last revision : June 2023
Data ultimei revizuirii: Iunie 2023
AU7662_V03
009.000956

GYENGÉD HIGIÉNYIA

AUDISPRAY JUNIOR

Az AUDISPRAY Junior mikrobiológiailag ellenőrzött hipertóniás tengervizes oldatot és a gyermekek hallójáratának bőrét védő glicerint tartalmaz. Az AUDISPRAY Junior a vattás fültisztító pálcikák alternatívája.

Mire való az AUDISPRAY JUNIOR?

Az AUDISPRAY Junior meglágyítja és gyengéden feloldja a fülzsír minden fölöslegét és így elősegíti annak természetes úton való távozását. Az Audispray Junior a hozzáadott glicerinnel óvja és hidratálja a gyermekek érzékeny hallójáratát. Az AUDISPRAY Junior hajtógáz nélkül és túlnyomás ellen védő szórófejjel ellátva biztosít rendszeres és biztonságos fültisztítást.

Ki használhatja az AUDISPRAY JUNIOR terméket?

Gyermekek 3-12 éves korig: 1–2 fújás fülenként, hetente 2 alkalommal. Azoknál a gyermekeknél, akiknél sok fülzsír termelődik, az AUDISPRAY Junior terméket minden nap használhatják.

Hogyan használja az AUDISPRAY JUNIOR terméket?

1. Irányítsa a szórófejet a gyermek füle felé a flakont függőlegesen tartva, majd permetezzen 1-2 fújást mindkét fülbe.
2. Néhány másodpercen keresztül masszírozza a fültövét.
3. Döntse oldalra a gyermek fejét, hogy a felesleg kiürülhessen, majd törölje meg.
4. A szórófejet minden használat után meleg vízzel öblítse le.

Ellenjavallatok

Használata ellenjavallt dobhártya levegőztető (dobüregi) tubust használóknál, fülgyulladás, illetve dobhártya perforáció esetén, valamint akiknél jelenleg fennáll vagy korábban történt ezzel kapcsolatos orvosi előzmény (szédülés, orvosi vagy sebészeti beavatkozások.)

Óvintézkedések az alkalmazásnál

Kétség vagy a termék alkalmazását megelőző fájdalom esetén kérje ki gyógyszerésze vagy orvosa tanácsát. Amennyiben a fülzsírdugó már kialakult, az AUDISPRAY Junior alkalmazása következtében a dugó megduzzadhat, ami kellemetlenséggel járhat. Kérjük ebben az esetben forduljon orvosához.

Javasoljuk, hogy az AUDISPRAY Junior terméket az első használatot követően egy éven belül használja el. Ne lépje túl a csomagoláson és a flakonon feltüntetett lejáratidőt.

AZ AUDISPRAY Junior termékkel kapcsolatos nemkívánatos mellékhatás esetén értesítse a termék gyártóját, valamint a lakóhelye szerint illetékes hatóságot.

AUDISPRAY JUNIOR a 93/42/EGK európai irányelvnek megfelelő orvostechnikai eszköz.